

COVID-19 Antigen Rapid Test


- Zur Selbsttestung
- CE-Kennzeichnung



(1 Test/Kit, 5 Tests/Kit, 25 Tests/Kit)

Der COVID-19 Antigen Rapid Test ist ein Lateral-Flow-Test zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Antigenen in Nasenabstrichen von Personen mit Symptomen oder Personen, bei denen aus anderen epidemiologischen Gründen der Verdacht auf eine COVID-19 Infektion besteht. Dieser Test ist zur Selbsttestung von Personen über 15 Jahren oder zur Testung von Personen unter 15 Jahren durch einen Erwachsenen vorgesehen. Personen über 65 Jahre sollten sich bei der Durchführung des Tests helfen lassen.

● Zusammensetzung und Verpackungskartons des Exports

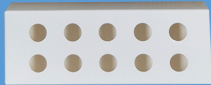Extraktionsreagenzröhrchen	Tupfer	Testkassette	Abfallbeutel	Arbeitsstation (nur für 25 Tests)
				

Hinweis: Die Gebrauchsanweisung ist darin enthalten.

Katalognummer	Spezifikation	Gesamtzahl pro Karton	Größe	Geschätztes Bruttogewicht
ISCOVu002-B001	1 Test/ kit	400 Tests/ 400 kits	54*45.5*29	15.03
ISCOVu002-B005	5 Tests/ kit	1200 Tests/ 240 kits	59*40*58	22.98
ISCOVu002-B025	25 Tests/ kit	1250 Tests/ 50 kits	64*34*55	19.86

● Merkmal

- Hohe Sensitivität und Spezifität.
- Schnelltest in 15-20 minuten.
- Einfach zum Probenentnehmen.
- Kein Instrument erforderlich.
- Ergebnisse sind deutlich sichtbar.
- Frühe Infektion erkennen.

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.

Add: No.1 Yichuang Road, Yuhang Sub-district, Yuhang District, 311121 Hangzhou, China

Tel: +86 (0)571-88617879

Web: <https://en.clongene.com>

E-mail: marketing@clongene.com

Testverfahren


1

Bitte lesen Sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanweisung genau.




2

Öffnen des Extraktionsreagenzröhrchens.

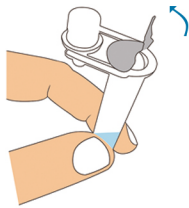


3

Röhrchen in die Schachtel einsetzen.

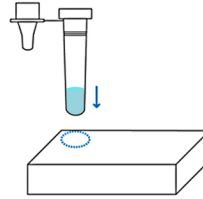


4

Tupfer öffnen.

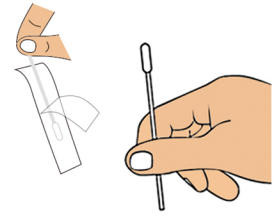



5

Abstrich linkes Nasenloch.

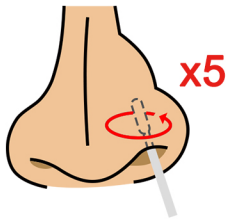


6

Abstrich rechtes Nasenloch.

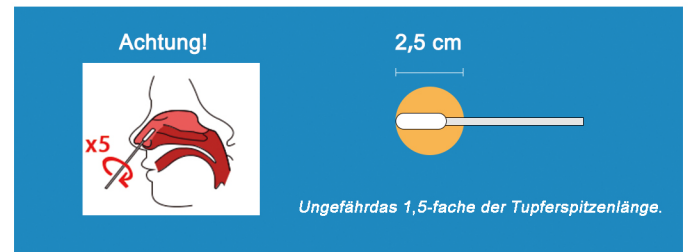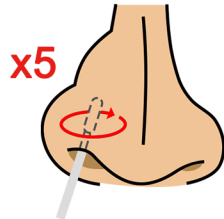

7


Führen Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen ein und drehen Sie 5-mal den Tupfer.

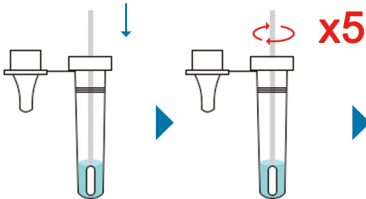

Belassen Sie den
Tupfer für 1 Minute im
Extraktionsreagenz.


8

Nehmen Sie den Tupfer heraus und verschließen Sie das Extraktionsröhrchen.

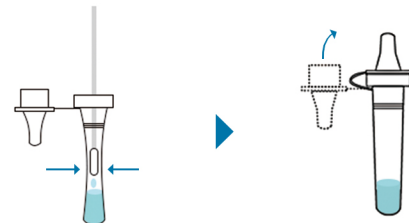

9

Öffnen der Testkassette.

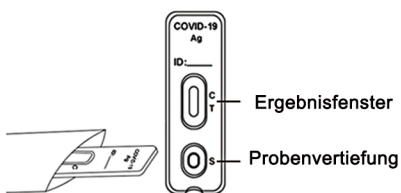

10

Probe in Probenvertiefung geben.



11

15 Minuten warten.



12

Auswertung der Ergebnisse



13

Entsorgung des benutzten Testkits.

